

目線が高くなつて  
お話しが  
しやすくなつた

## 洗身チェアユニット リフトン ウェーブ



誰もが笑顔になる心地よさと安心感

入浴は身体を清潔にするだけでなく、気持ちをリラックスさせたり、血行を良くして代謝を高めるなどさまざまな効果があります。

その一方で、介助をする方が無理な姿勢での身体の負担や、滑るなどの危険を伴うことが少なくありません。リフトン ウェーブは、もっと安全に、もっと安心して入浴時間を過ごしていただけよう、これまでにないシンプルな造りと操作性、そして何より安全性を考慮しました。

**ABILITIES**  
アビリティーズ  
<https://www.abilities.jp/>

# 自由度の高い調整と スタンドの組み合わせで、 どなたにも最適な姿勢を

さまざまな方にお使いいただけるように、サイズは S / M / L の 3 タイプ。

身長 76cm ~ 188cm、体重 113kg の方までご利用いただけます。背もたれ、座面、脚載せはそれぞれ 6 段階に角度調整ができるので、お一人おひとりに合わせてリラックスした姿勢をお選びいただけます。また、背もたれと脚載せ部分をすべて倒して、シート全体をフルフラットにすることも可能です。

狭い浴室でも使いやすい「脚載せ無」タイプもあります。



片手でできる、背もたれ調整

背もたれの角度調整は、背面のハンドルを握って動かすだけ。お使いになる方の様子を見ながら片手で簡単に行なえます。



座面と脚載せ部分もシンプル調整

座面はレバーで、脚載せ部分はボタンで角度が簡単に調整できます。背もたれを倒したときでも、座面と脚載せの角度を調整すれば、身体のずり落ちを防ぐことができて安心です。



背もたれ部



座面部



脚載せ部

※ それぞれ 6 段階に角度調整ができます。



#### さっと取り外せるシート

お肌に優しいクッション性のあるシートは、簡単に取り外して洗濯ができます。

### チェストストラップで濡れた身体をしっかりとサポート

シートに取り付けたストラップで、濡れた身体もしっかりとサポート。脚載せ付本体用は、身体をより安定させる補助ストラップ付タイプ、脚載せ無本体用は、補助ストラップ無のシンプルタイプです。

## オプション



2つのソフトブロックで、頭部を優しくしっかりとサポートします。



大腿部をサポートします。チェストストラップと併用すると、上肢と下肢をしっかりとサポートできます。



#### シャワースタンド

居室から浴室への移動もスムーズに。取り付けると座面高は約 75cm に。



浴槽内でも使用できます。スタンドの脚が折り曲げられ、座面高を約 37cm または約 52cm にできます。



#### タブトランスクロー (右回り、左回り)

浴槽ふちをまたいで設置。座面を回転させ、浴槽上でシャワー浴ができます。取付時座面高は 58 ~ 70cm (標準脚)、68 ~ 80cm (ロング脚) に。

# 適合表／製品仕様

	S		M		L			
	脚載せ付	脚載せ無	脚載せ付	脚載せ無	脚載せ付	脚載せ無		
適合身長	76 ~ 117cm		102 ~ 142cm		127 ~ 188cm			
最大荷重	34kg		68kg		113kg			
重量	6.7kg	5.5kg	7.7kg	6.1kg	8.8kg	6.6kg		
全幅	48cm				53.5cm			
全奥行(水平時)	108cm	89cm	125cm	104cm	155cm	128cm		
座面幅	38cm				44cm			
座面奥行	27cm		33cm		43cm			
座面高(脚高さ)	11・23cm							
背もたれ長さ	58cm		67cm		81cm			
脚載せ長さ	20cm	—	20cm	—	25cm	—		
別売オプション	ヘッドサポート高さ	約8cm						
	レッグストラップ長さ	106cm			120cm			
	タブスタンド	幅44×奥行99×高さ20cm(取付時座面高37・52cm)、重量3.1kg						
	シャワースタンド	幅69×奥行86×高さ56cm(取付時座面高75cm)、重量8.0kg						
	タブトランスファー(右回りまたは左回り)	幅71×奥行76×高さ／標準脚48～60cm、ロング脚58～70cm (取付時座面高／標準脚58～70cm、ロング脚68～80cm)、重量9kg						
材質		シート：ポリエステル、ナイロン フレーム：粉体塗装アルミニウム、工業用樹脂、ステンレス						



**ABILITIES アビリティーズ**  
<https://www.abilities.jp/>  
 (無料通話) やさしいようぐを  
**0120-834490**  
 —お近くの営業所につながります—

**アビリティーズ・ケアネット株式会社**  
 [本社] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウェストビル1階

[営業所] 札幌市/仙台市/栃木市/川口市/渋谷区/葛飾区/武蔵野市/八王子市/船橋市/横浜市/平塚市/松本市/名古屋市/新潟市/金沢市/大阪市/和泉市/西宮市/広島市/福山市/北九州市/福岡市 [現地法人] 台北市(台湾)

\*商品の外観、仕様等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

\*禁無断転載・複写 \*このチラシの記載内容は2025年4月のものです。