

よりスマートに、より効率的に、
どんな道でも介助者をアシストする

自動アシスト

押し手のハンドルを握って、レッツゴー！
ボタンを押す必要はありません。

動きを感知すると、自動アシスト機能が歩行ペースに最適な推進力を提供し、押す際の労力を軽減します。歩く速度が速いほど、より多くのアシストを受けられます。さらに、必要な時だけ電力が供給されるため、バッテリーも長く持ちます。

距離検知センサー

R10の距離検知センサーは、
操作者が押し手を握っていないことを検知した場合、
自動的に動作を停止します。

これにより、車いすは操作者がいる場合にのみ動くことが保証され、利用者と車いす介助者の双方にとって、さらなる安全性が確保されます。

最大約12 キロメートルまで

軽量(1.2キログラム)で取り外し可能な
5AHリチウムイオンバッテリーを搭載したR10は、
最大約12キロの走行距離を実現します。

移動の合間に充電する必要がなく、
安心してご利用いただけます。

定速アシスト

定速アシストモードでは、ボタンを押すだけで
一定の速度を維持できます。

なんと最大8度の傾斜路でも大丈夫です！
R10は、坂道を平坦に感じさせ、重さを感じさせません。



製品仕様

総重量	6.9 kg
駆動ユニットの重量	3.7 kg
モーター	250W、36V/15A、ギア付きブラシレスモーター
モーターブレーキ	なし、後方への駆動不可
バッテリー	36V、5Ah リチウムイオン
耐荷重	130 kg
ギアの数	3 段階
ホイールサイズ	6"
バッテリーパックの重量	1.2 kg
推定走行距離	最大約 12 km*
充電時間	約 2.5～3時間 (充電電流2 Aの場合)
最大安全勾配	8°
保証	バッテリー：2年、モーター：3 年
自動アシストモード&定速アシストモード における速度制限	ギア 1: 1.5km/h ギア 2: 3km/h ギア 3: 4.5km/h

* テスト環境はギア3で、平坦な地面においてアシストボタンを使用。積載容量は115kg。車いすによって、数値は異なります。
(例：路面状況、利用者の体重、運転能力、追加重量、地形など)

ユニバーサル ドッキング システム

丸いパイプを使用した ほとんどのボックスフレーム車いすに適合！

速度オプション

3段階の最高速度設定：時速 1.5km、3.0km、4.5 km

どのモードをご利用の場合でも、速度制限を設定することで、
選択されたペースを超えないようにすることができます。

搬送性

車いすと一緒に折りたためます。取り外しも簡単。

すべてを一つにまとめて持ち運びやすい携帯用バックパック付き
折りたたみ時もベルクロストラップでしっかり固定

バッテリーの充電

充電ポートにアクセス かんたん

3時間で満充電完了



詳しい詳細、仕様、オプション、アクセサリについてはオーダーフォームをご確認ください。
全ての情報は予告なしに変更する場合があります。ご不明な点は、サンライズメディカルにご相談ください。



視覚に障がいのある方は、PDFでもご覧いただけます。www.SunriseMedical.eu.

ABILITIES アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>
(無料通話) やさしいようぐを
0120-834490
— お近くの営業所につながります —

アビリティーズ・ケアネット株式会社
[本社] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル1階

[営業所] 札幌市／仙台市／栃木市／川口市／渋谷区／葛飾区／三鷹市／八王子市／
船橋市／横浜市／平塚市／松本市／名古屋市／新潟市／金沢市／大阪市／和泉市／
西宮市／広島市／福山市／北九州市／福岡市

※商品の外観、仕様等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と
若干異なる場合があります。

※禁無断転載・複写