

持ち上げない介護で 事故防止・負担軽減! 少人数・軽い力で水平移乗

福祉用具の活用で自立支援、
安全・安心な介護の実現

ABILITIES


アビリティーズ

Since 1966

<https://www.abilities.jp/>

移乗ボード イージーロール 45

- ベッドからフルリクライニング車いす、ストレッチャー等への移乗に最適。
- インナーボード周りのロール状 OUTER シートが回転。軽い力で移乗を行えます。
- 多少の隙間や凹凸があっても、適度な硬さのインナーボードにより、安全・スムーズに移乗可能。
- 軽量（約 2.2kg）で 2 つ折りにでき、容易に持ち運べます。（収納ケース付）

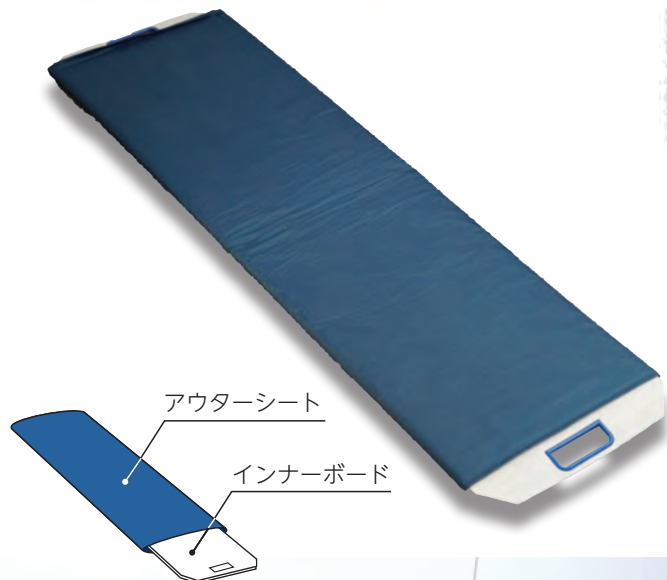

最大荷重
250kg

介護保険
レンタル
対象品

軽い力で水平に
ボードごと横移動



商品番号	商品名	販売価格 (税込)	レンタル コード	月額レンタル料 (税込)
7300-70	イージーロール 45 (ボード幅 45cm)	44,000 円	E374	2,600 円

●寸法/外寸:幅 45×長さ 170×厚さ約 2cm、
折りたたみ時:幅 45×長さ 85×厚さ約 4cm
●重量/約 2.2kg ●材質/ナイロン、PP、発泡
PE ●付属品/収納ケース ※商品の構造上、
寸法・重量には誤差が生じる場合があります。

使用方法

1 隙間がないように車いすを横付けしたのち、利用者を側臥位にして、その背中に本品を差し込みます。



2 利用者を側臥位から元に戻し、移乗先方向に押します。




3 アウターシートが回転し、ボードごと身体を車いす上に移乗させます。



4 一旦、移乗先で側臥位にした後に本品を抜き、仰臥位に戻すと移乗の完了です。



◆ 2つ折りにして持ち運びも容易！コンパクト収納！

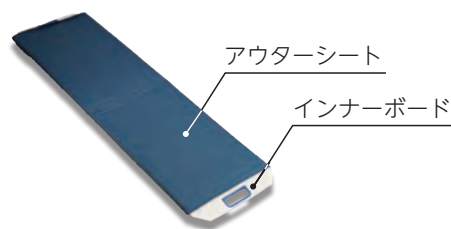

▼交換用パーツ（イージーロール 45 用） 販売価格（税込）		
7300-71	インナーボード	¥36,300
7300-72	アウターシート	¥8,800
7300-73	収納ケース	¥1,100

ABILITIES アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>

（無料通話） やさしいようぐを
0120-834490

— お近くの営業所につながります —

アビリティーズ・ケアネット株式会社
 【本社】〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル1階

【営業所】札幌市／仙台市／栃木市／川口市／渋谷区／葛飾区／三鷹市／八王子市／船橋市／横浜市／平塚市／松本市／名古屋市／新潟市／金沢市／大阪市／和泉市／西宮市／広島市／福山市／北九州市／福岡市【現地法人】台北市／台南市（台湾）

※商品の外観、仕様等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

※禁無断転載・複写 ※このチラシの記載内容は 2026年3月のものです。